

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ COMPLEX KAPSZULÁHOZ

Felhasználás: beöntésre ,végbélöblítésre és hüvelyöblítésre szolgáló készítmény

Ajánlott:

- beöntéshez
- végbél öblítéshez
- székrekedés esetén
- aranyeres panaszok enyhítésére
- hüvelyöblítésre

A kapszula használható:

- MedCare Intimzuhanyba helyezve, vagy
- Multifunkciós zuhany nyelébe helyezve az Intim applicátorral

Az eszköz összeszerelése

- bontsa ki a légmentesen lezárt fóliából a kapszulát.
- A kapszulát helyezze a kiválasztott eszköz nyelébe úgy, hogy a kapszulában lévő dugattyú a nyelv alsó feléhez kerüljön
- A kapszulával töltött nyelet a kezelőfejjel (a kialakított bajonettzár segítségével) csavarja egymásba.
- Ügyeljen rá, hogy az összeillesztésnél a 2 elem pontosan záródjon.

Az eszköz csatlakoztatása a kád / bidé csaptelepre

- Az így összeállított eszközt egy zuhany gégecsőre csavarva csatlakoztathatja a kád vagy a bidé csaptelepre

A víz hőmérsékletének a beállítása

- A kád/ bidé csaptelepet helyezze normál kifolyóállásba.
- Állítsa be a kívánt vízhőmérsékletet, majd hagyja vizet folyni.
- Gázbojleres üzemeltetés esetén a készülék használatával egyidejűleg nyisson meg egy másik melegvizes csapot is, a víznyomás megtartása érdekében.

A kezelés folyamata

- Győződjön meg, hogy a csaptelepből folyó víz hőmérséklete nem változott
- Amennyiben a vízhőmérséklet megfelelő, helyezze a kezelőfejet a hüvelybe/végbélbe (végbélhez síkosító használata javasolt)
- Csak ezután állítsa a csaptelep gombját zuhany funkcióra!
- A kapszulában lévő sóoldat kb. egy liter vízzel kioldódik
- A kezelés 1 percen belül megtörténik, majd a készülék automatikusan leáll.

A kezelőfejet húzza ki a hüvelyből/végbélből.

Szét szerelés

- Zárja el a vízcsapot.

- Csavarja szét az eszközt.
- Vegye ki a kiürült kapszulát, melyet a háztartási hulladékok közé dobhat.
- Az eszközt alaposan mossa el. Fertőtlenítéséhez Neomagnol , vagy gyógyszerári műanyag felület fertőtlenítőszer javasolt.

Használatáról és annak gyakoriságáról kérdezze orvosát, gyógyszerészét.

Száraz, hűvös helyen, gyermektől elzárva, lehetőleg gyógyszerek között kell tartani.

