

INTIMZUHANY - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A MedCare Intimzuhany egy önállóan kapható, hüvelykezelésre és végbél beöntésre alkalmas eszköz.

Az Intimzuhany 2 elemből áll, egy zuhanynyélből és egy Applicator kezelőfejből.

A MedCrae Intimzuhany csak és kizárólag a külön kapható, különböző töltetű MedCare kapszulákkal működik.

hüvelyöblítéshez:

- Tejsavas gél kapszula
- Kakukkfű és Cickafark kivonatú gél
- Levendula kivonatú gél
- Körömvirág és Orvosi Zsálya kivonatú gél

gyógyszeres kezeléshez:

- Magisztrális kapszula (tölthető)

beöntéshez:

- Complex kapszula (só kapszula)

Az eszköz összeszerelése

Első használat előtt az eszközt mossa el !

- a kapszulát helyezze a nyélbe oly módon, hogy a kapszula záró dugattyúja a nyél alsó feléhez essen, majd a kezelőfejet a nyéllal (a kialakított bajonettzár segítségével csavarja egymásba, ügyeljen rá, hogy az összeillesztésnél a 2 elem pontosan záródjon.

Az eszköz csatlakoztatása a bidé/zuhanyra

- a zuhanycsőrőt csavarja le a zuhanyfejet, csavarja a zuhanyfej helyére a fentiek szerint előre összeállított eszközt

A víz hőmérsékletének a beállítása

- a csaptelepét helyezze normál kifolyóállásba
- állítsa be a kívánt víz hőmérsékletet, majd hagyja a vizet folyni. Gázbojleres működtetés esetén egy másik melegvizet csapot is nyisson meg, hogy a víz nyomása ne változzon.

A kezelés folyamata

a./ hüvelykezelés esetén:

- győződjön meg, hogy a csaptelepből folyó víz hőmérséklete megfelelő, amennyiben a víz hőmérséklet megfelelő, helyezze az irrigáló fejet a hüvelybe,
- csak ezután állítsa a csaptelep gombját zuhany funkcióra!
- a kezelés (előbb fertőtlenítő öblítés fiziológiai koncentrátumú sóoldattal , majd a kívánt hatóanyag bevitele) 1perc alatt megtörténik, majd a készülék működése automatikusan leáll
- húzza ki az eszközt a hüvelyből

b./ beöntés, végbélkezelés esetén:

- győződjön meg, hogy a csaptelepből folyó víz hőmérséklete

megfelelő, amennyiben a víz hőmérséklete megfelelő,
helyezze a kezelőfejet a végbélbe, könnyebb behelyezés érdekében
használjon vízbázisú síkosítót.

- csak ezután állítsa a csapterlep gombját zuhany funkcióra!
- a kezelés (beöntés fiziológiai koncentrátumú sóoldattal)
1 perc alatt megtörténik, majd a készülék működése
automatikusan leáll.
- húzza ki az eszközt a végbélből

Szétszerelés

- zárja el a vízcsapot, csavarja vissza a zuhanyfejet
- vegye ki a kiürült kapszulát, melyet a háztartási
hulladékok, közé dobhat
- az eszközt alaposan mossa el Neomagnollal vagy más
gyógyszertári műanyag felület fertőtlenítővel.

Az Applicator kezelőfej kompatibilis a SPA Multifunkciós zuhanynyélhez is !