

Használati utasítás INTIM APPLICATORHOZ

Az Intim Applicator egy külön megvásárolható adapter, melyet a

MedCare Intimzuhanyhoz, vagy a Multifunkciós zuhanyhoz

kell csatlakoztatni és a nyelébe a funkciónak megfelelő kapszulát kell helyezni

Használatával zuhanyozás közben különböző anális vagy vaginális kezeléseket végezhetünk

Multifunkciós zuhany intim applicátorral

Az eszköz összeszerelése intim kezeléshez

Intim kezelés alkalmával a zuhany nyelbe a kívánt intim kapszulát kell behelyezni és az intim applicátort kell a nyélhez csavarni.

Az összeszerelést követően állítsa a csaptelepet kifolyóállásba, és így állítsa be a kívánt hőfokot.

-Helyezze az applicatorfejet a hüvelybe vagy a végbélbe. Végbélkezeléshez vizes alapú síkosító használata javasolt !

-Győződjön meg, hogy a víz hőmérséklete megfelelő, majd ezután állítsa a csaptelepet zuhany funkcióra.

-Az eszköz azonnal működésbe lép, és a kezelés pár másodpercen belül meg is történik.

-A kezelés végével a készülék automatikusan leáll.

-Húzza ki az applicátort a hüvelyből /végbélből.

-Zárja el a csapot, óvatosan csavarja le a nyélről a kezelőfejet.

-Vegye ki a kapszulát. A kapszula egyszer használatos, és a háztartási vagy szelektív szemétbe dobható.

Az eszköz használatáról és annak gyakoriságáról kérdezze orvosát, gyógyszerészét.

Figyelmeztetés: Gázbojleres működtetés esetén a használat idejére

kérjük, hogy nyisson meg egy másik meleg vizes csapot is, hogy a készülék nyomása ne változzon.

Amennyiben Ön a SPA Multifunkciós zuhany nyelét használja, és a víznyomás csökkenését tapasztalja, csavarja le a zuhanynyél végéről a csavarmenetet, és az oda beépített előszűrőt, mely a mechanikai szennyeződést szűri ki, mossa át, majd a végelemet csavarja vissza.

Külön applicatort kell használni beöntéshez és külön applicatort a hüvelykezeléshez ! Az eszköz fertőtlenítése Neomagnollal vagy bármely más , gyógyszerertári műanyag felületfertőtlenítővel javasolt.

Egy Applicatort csak 1 személy használhat !